


VÝSLEDOK za 15 minút

AESKU.RAPID

SARS-CoV-2 Rapid Test

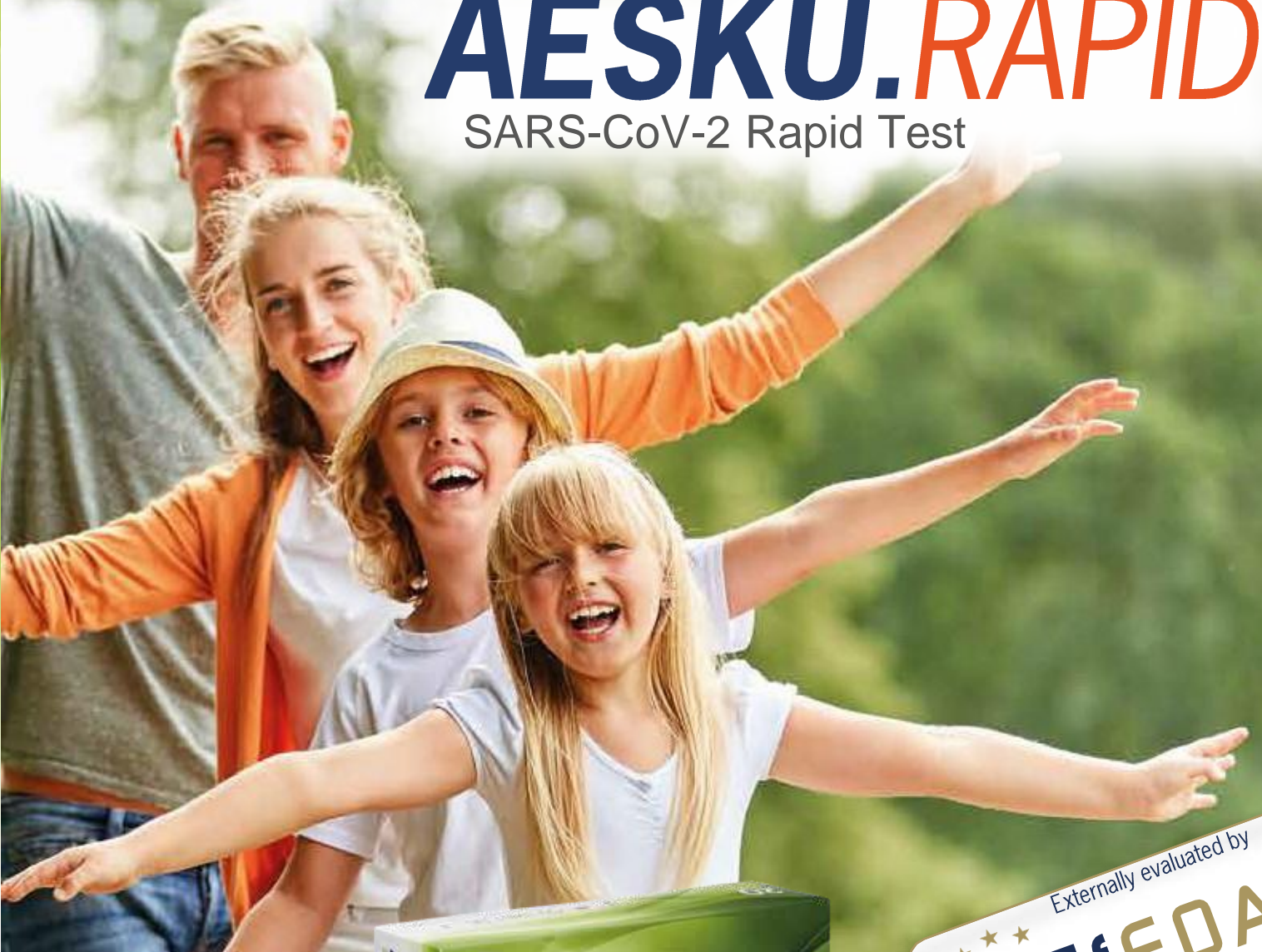

VYSOKO PRESNÉ • FLEXIBILNÉ • POHODLNÉ



AESKU GROUP
WE TAKE CARE OF YOUR HEALTH

AESKU.RAPID

SARS-CoV-2 Rapid Test

AESKU.RAPID SARS-CoV-2 Rapid Test je určený na kvalitatívne stanovenie nukleokapsidového proteínového antigénu vo vzorkách výterov z nosa. Princíp imunochromatografická polymérová technológia.

Test je v zozname akceptovaných diagnostických testov na COVID-19 na webovej stránke Európskej komisie, v súlade s vyhláškou ÚVZ SR č. 264/2021:

<https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/2108>

ESfEQA Hodnotiaca štúdia: AESKU SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Verzia 003, December 2020


AESKU.RAPID

Citlivosť 100% C_t -hodnota ≤ 30.0
(95% CI 92% - 100%)

Špecifickosť 98% (95% CI 95% - 99%)

RT-PCR

	Pozit	Negat	Spolu
Pozitívne	101	4	105
Negatívne	4	218	222
Spolu	105	222	327

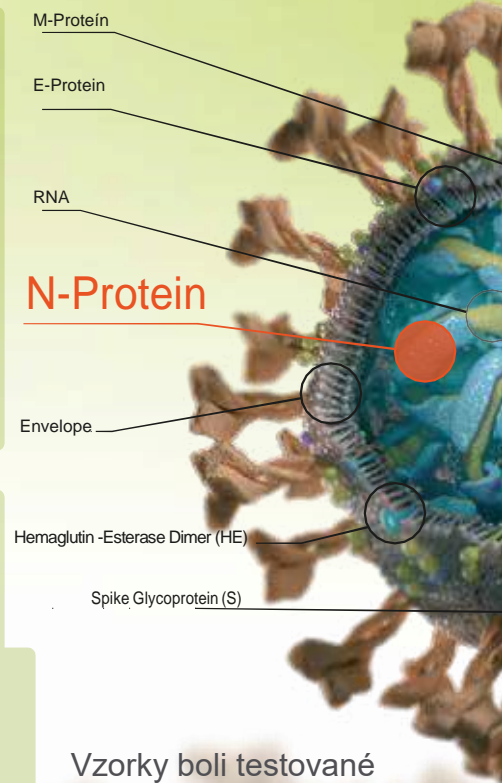

Vzorky boli testované paralelne s testom RT-PCR popredného európskeho výrobcu.

Externally evaluated by




European Society for
External Quality Assessment

..., výsledky sa vyznačujú vysokou citlivosťou SARS-CoV-2 AESKU.RAPID testu v porovnaní s inými komerčnými antigénnymi testami na SARS-CoV-2

Pozitívne výsledky testov potvrdzujú prítomnosť vírusových antigénov.

Negatívne výsledky testov úplne nevylučujú COVID-19.

Na určenie stavu infekcie je však stále potrebná klinická anamnéza pacienta.

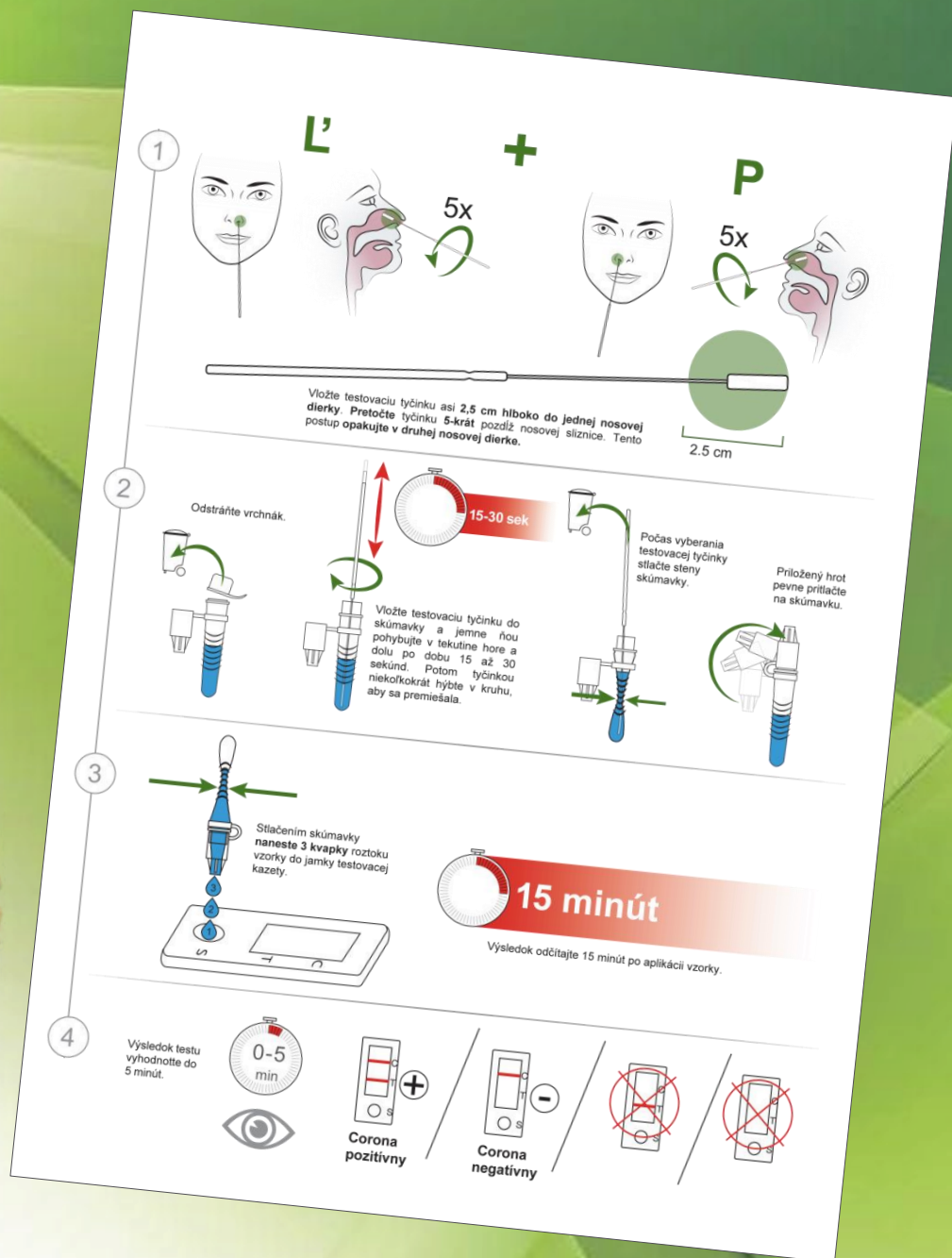

Obsah balenia:

- Skúmavky s extrakčným pufrom
- Testovacie kazety na antigén SARS-CoV-2 (individuálne zabezpečené)
- Odberové tampóny
- Návod na použitie
- Stručný návod



Hlavné výhody

Rýchlo test na priamu detekciu SARS-CoV-2 NP antigénu

Rýchly výsledok po 15 minútach

Princíp Lateral-Flow

Odber vzorky: minimálne invazívny tampón z nosa (hĺbka 2,5 cm)

Veľmi vysoká citlivosť: 100% C_t-Hodnota ≤ 30.0 (95% CI 92%-100%)

Veľmi vysoká špecifickosť 98% (95% CI 95%-99%)

Detekčný limit 50 TCID₅₀/ml

Žiadna krížová reaktivita

Rýchly antigénový test je stabilný až 18 mesiacov pri teplote 4-30°C a je určený na spracovanie pri izbovej teplote (15-30°C)
Testovací materiál pred použitím vytemperujte na izbovú teplotu.

Každý test je balený jednotlivo v zapečatenom fóliovom vrecku

Veľkosť balenia:

5 Testov, vrátane spotrebných materiálov

20 Testov, vrátane spotrebných materiálov

CE-Certifikované

Objednávacie údaje:

Kat. č.
840003

Produkt:
AESKU.RAPID
SARS-CoV-2

Formát:
5 Testov

Popis:
AESKU.RAPID SARS-CoV-2 je špecifický rýchlo test určený na priamu detekciu SARS-CoV-2 NP antigénu vo vzorkách výterov z nosa.


Kat. č.
840001

Produkt:
AESKU.RAPID
SARS-CoV-2

Formát:
20 Testov

Popis:
AESKU.RAPID SARS-CoV-2 je špecifický rýchlo test určený na priamu detekciu SARS-CoV-2 NP antigénu vo vzorkách výterov z nosa.



 R-Diagnostics SK s.r.o.,
Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
office@r-diagnostics.sk, www.r-diagnostics.sk
Tel: +421/918 113 834, +421/918 113 835,